

Внимание: Тази информация за употреба е в съответствие с IVD директива 98/79/ЕО и е предназначена за потребители, които работят в държави членки на Европейския съюз

ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА

ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION е предназначен САМО ЗА УПОТРЕБА ПРИ IN VITRO ДИАГНОСТИКА за разреждане на проби от пациенти с концентрации на адренотропичен хормон (ACTH) над горната граница на обхвата на изследването.

ПРЕДОСТАВЕН МАТЕРИАЛ

Каталожен №	0025521
4 x 4 ml	ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION
	Буфериран говежди серумен албумин, който не съдържа доловими концентрации на ACTH, с натриев азид като консервант.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION е предназначен единствено за диагностично приложение ин витро.
2. Преди да пристъпите към работа, огледайте кутията и външността на флаконите за следи от повреди. Ако се открият каквито и да било повреди, уведомете местния търговски представител на TOSOH.
3. Материалът съдържа натриев азид, който може да реагира с оловни или медни водопроводни тръби и да образува потенциално експлозивни метални азиди. Когато изхвърляте такива реагенти, винаги изплаквайте обилно с вода, за да предпазите от натрупване на азид.
4. Въпреки че материал от човешки произход не се използва като разтвор за разреждане на проби, се препоръчва при работа с този продукт да се спазват същите предпазни мерки, както и при пробите от пациенти.
5. Не използвайте след изтичане на срока на годност.
6. За безопасно изхвърляне на отпадъците се препоръчва всяка лаборатория да спазва установените лабораторни процедури, както и местните, държавните и федералните разпоредби.
7. След отваряне, флаконът с разтвора за разреждане на пробите трябва да се съхранява плътно затворен с чиста гумена тапа. Затварянето със замърсен материал може да доведе до влошаване на реагента.
8. Останалият след употреба разтвор за разреждане на пробите не трябва да се смесва с друг флакон, а да се изхвърли, за да се избегне замърсяване.

ПОДГОТОВКА НА РЕАГЕНТИТЕ

ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION се доставя готов за употреба. **Преди употреба трябва да се темперира при 18°–25°C за 30 минути.**

СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ

- Винаги съхранявайте ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION в изправена позиция.
- Когато се съхранява неотварян и в хладилник при температура 2°–8°C, разтвор за разреждане на пробите ще остане стабилен до изтичане на срока на годност, отбелязан върху етикета.

- Разтворът за разреждане на пробите трябва да се използва в рамките на 6 дни, когато е отворен до 7 часа при температура 18-25°C в самия ден и флаконите се държат плътно затворени в хладилник при 2-8°C веднага след употреба. Преди употреба трябва да се темперира при 18°–25°C за 30 минути. Разтворът за разреждане на пробите може да се използва до 90 дни, при условие че 1) се използва CAMO за ръчни разреждания и 2) веднага след употреба флаконите се съхраняват плътно затворени в хладилник.

ПРОЦЕДУРА

Вижте ръководството за оператора на анализатора на системата AIA на фирма TOSOH за допълнителни процедурни указания относно разреждането на пробите.

1. Ако се установи, че концентрацията на ACTH в дадена проба е по-висока от горната граница на диапазона на изследването от 2000 pg/ml, пробата трябва да бъде разреждана със ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION и изследвана съгласно ПРОЦЕДУРАТА в приложения документ на ST AIA-PACK ACTH.
2. Ако преди изследването на разредената проба факторите на разреждане са въведени в програмата на апарата, AIA Nex•IA / AIA-21, AIA-600 II, AIA-900, AIA-900, AIA-1800 и AIA-2000 ще изпълняват разрежданията автоматично.
3. Препоръчаното разреждане на проби, съдържащи над 2000 pg/ml, е 10-кратно разреждане. Желателно е да разределите пробата така, че разредената проба да съдържа между 2,0 и 2000 pg/ml.

РЕЗУЛТАТИ

Когато се извършва автоматично разреждане, анализаторите AIA на фирма TOSOH ще изчислят крайния резултат.

ОГРАНИЧЕНИЯ

ST AIA-PACK ACTH SAMPLE DILUTING SOLUTION е предназначен за употреба само с процедурите за изследване на ST AIA-PACK ACTH.




TOSOH CORPORATION

3-8-2, Shiba-Koen, Minato-ku
TOKYO 105-8623 (ЯПОНИЯ)
Тел.: +81 (0)3 5427 5181 Факс: +81 (0)3 5427 5220



TOSOH EUROPE N.V.

Transportstraat 4
B-3980 TESSENDERLO, БЕЛГИЯ
Тел.: +32 (0)13 66 88 30 Факс: +32 (0)13 66 47 49

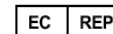

TOSOH BIOSCIENCE, INC.

6000 Shoreline Court, Suite 101
South San Francisco, CA 94080, САЩ
Телефон: +1 650 615 49 70



Нетен обем (след разтваряне на лиофилизирания материал)