

Bemærk: Denne brugsvejledning overholder IVD-direktivet 98/79/EF og er beregnet til at bruges af kunder, der opererer i et EU-medlemsland

ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION

ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION er udelukkende beregnet til IN VITRO-DIAGNOSTICERING til fortynding af patientprøver, der har koncentrationer af parathyreoideahormon (PTH) over analyseområdet øvre grænse.

INDHOLD

Kat. nr.	0025530
4 x 4 ml	ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION
	Proteinmatrix ikke indeholdende nogen sporbar koncentration af PTH med natriumazid som konserveringsmiddel.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

1. ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION er udelukkende beregnet til in vitro-diagnosticering.
2. Undersøg emballagen og flaskernes ydre for tegn på skader før brug. Hvis der er nogen synlige skader, kontaktes den lokale TOSOH-distributør.
3. Dette materiale indeholder natriumazid, som kan reagere med bly- eller kobberberør og danne potentielt eksplosive metalazider. Når sådanne reagenser hældes bort, skal der altid skylles efter med store mængder vand for at undgå azidopbygning.
4. Selvom der til prøvefortyndingsopløsningen ikke anvendes materiale af human oprindelse, anbefales det, at dette produkt håndteres med samme forsigtighed, som der anvendes ved patientprøver.
5. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
6. For sikker bortskaffelse af affald anbefales det, at hvert enkelt laboratorium overholder fastsatte laboratorieprocedurer samt lokal og national lovgivning.
7. Efter åbning skal flasken med prøvefortyndingsopløsningen opbevares tæt forseglet med en ren gummihætte. Forsegling med urent materiale kan medføre en forringelse af reagenset.
8. Den resterende prøvefortyndingsopløsning må efter anvendelse ikke blandes med en anden flaske, men skal kasseres for at undgå kontaminering.

FORBEREDELSE AF REAGENSER

ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION leveres klar til brug. Prøvefortyndingsopløsningen skal bruges efter udligning til 18°-25° C i ca. 30 minutter.

OPBEVARING OG STABILITET

- Opbevar altid ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION opretstående.
- Når prøvefortyndingsopløsningen opbevares uåbnet og nedkølet ved 2°-8° C, er den stabil indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten.
- Efter åbning kan prøvefortyndingsopløsningen efterlades på TOSOH AIA-systemets analysatorer (18°-25° C) i maksimalt 3 døgn (3 x 24 timer). Når prøvefortyndingsopløsningen opbevares natten over ved 2°-8° C, kan den anvendes i op til 9 dage (9 cyklusser på 8 timer on-board og 16 timer i

køleskabet). Prøvefortyndingsopløsningen bør ikke bruges mere end 90 dage efter åbningen, heller ikke selvom den er forseglet og opbevares i køleskabet.

FREM GANGSMÅDE

Yderligere oplysninger om prøvefortynding kan findes i manualen til TOSOH AIA-systemet.

1. Hvis en prøves PTH -koncentration findes at være større end analyseområdet øvre grænse på 2.000 pg/ml, skal prøven fortyndes med ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION og analyseres i overensstemmelse med PROCEDUREN på indlægssedlen for ST AIA-PACK Whole PTH.
2. AIA Nex•IA / AIA-21, AIA-600 II, AIA-900, AIA-1800 og AIA-2000 vil automatisk udføre fortyndinger, hvis fortyndingsfaktorerne angives i softwaren inden analyse af den fortyndede prøve.
3. Den anbefalede fortynding for prøver, der indeholder mere end 2.000 pg/ml, er 10 gange fortynding. Det anbefales at fortynde prøven således, at den fortyndede prøve viser mellem 2,0 og 2.000 pg/ml.

RESULTATER

Når der udføres en automatisk fortynding, vil TOSOH AIA-systemanalysatorerne udregne det endelige resultat.

BEGRÆNSNINGER

ST AIA-PACK Whole PTH SAMPLE DILUTING SOLUTION er udelukkende beregnet til brug ved ST AIA-PACK Whole PTH-analyseprocedurer.



TOSOH CORPORATION


3-8-2, Shiba, Minato-ku
TOKYO 105-8623 (JAPAN)
Tlf.: +81 (0)3 5427 5181 Fax: +81 (0)3 5427 5220

TOSOH EUROPE N.V.

Transportstraat 4
B-3980 TESSENDERLO BELGIEN
Tlf.: +32 (0)13 66 88 30 Fax: +32 (0)13 66 47 49

TOSOH BIOSCIENCE, INC.

6000 Shoreline Court, Suite 101
South San Francisco, CA 94080 (USA)
Telefon: +1 650 615 4970 Fax: +1 650 615 0415

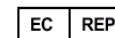

Nettovolumen (efter rekonstituerings-
for frysetørret materiale)